


mami**vac**

Gefrierbeutel-Set für Kolbenmilchpumpen

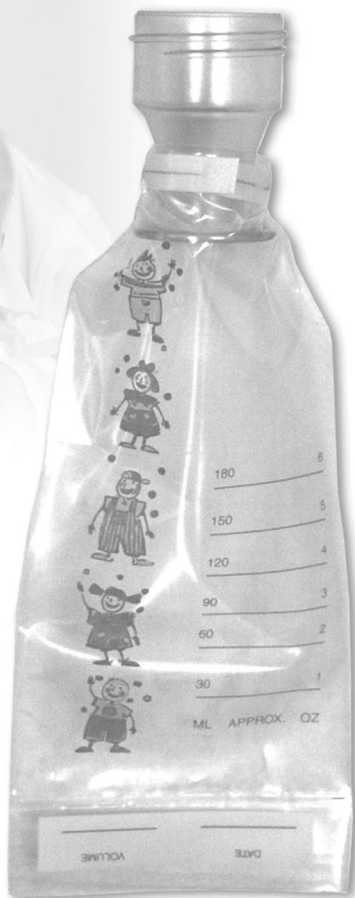

Gefrierbeutel-Set zum hygienischen direkten Abpumpen, für **Kolbenmilchpumpen** und unsere **Easy Handmilchpumpe**.



Inhalt:
20 Muttermilch-Gefrierbeutel,
1 Gefrierbeuteladapter



PZN 2410742

KaWeCo GmbH Gerlingerstrasse 36-38 71254 Ditzingen
Tel: 07156-33901 Fax: 07156-33911 email: info@kaweco.de

MECHANTECHNIK PUMPEN
Ka We Co
www.kaweco.de

Bedienungsanleitung - Muttermilch-Gefrierbeutel

Gefrierbeutel durch abreißen des Hygienestreifens öffnen.



Hygienelaschen auseinanderziehen.



Milch einfüllen oder direkt einpumpen.
(siehe Vorderseite)

Gefüllten Beutel durch einrollen verschließen.



Verschuß umknicken.
Evtl. Beutel beschriften. (z.b. Datum...)



Aufbewahrungsempfehlungen entnehmen Sie bitte der Beilage in der Gefrierbeutelverpackung.

Bedienungsanleitung - Gefrierbeuteladapter

Geöffneter Gefrierbeutel (siehe Rückseite) über den Adapterhals legen.



Beide Gefrierbeutelaschen am Adapter zusammendrücken.



Beide Laschen nach hinten knicken.



Beide Laschen miteinander verdrehen.

Die Flasche vom Kolbenmilchpump-Set (oder unserer Easy Handmilchpumpe) schrauben und an deren Stelle das Gefrierbeutelset anschrauben.

