

# mamivac<sup>®</sup>


## Thermo-pack

Das mamivac Thermo-pack ist eine anatomisch geformte Brustkomresse die entweder zum Wärmen oder zum Kühlen der Brust eingesetzt werden kann.

- zum Wärmen oder Kühlen
- hilft bei vielen Stillproblemen
- zur optimalen Entspannung
- angenehme Linderung bei Brustentzündung
- anatomisches Design
- universell einsetzbar
- mit Hygienehüllen

Art.Nr. 281487  
PZN 3175450

CE

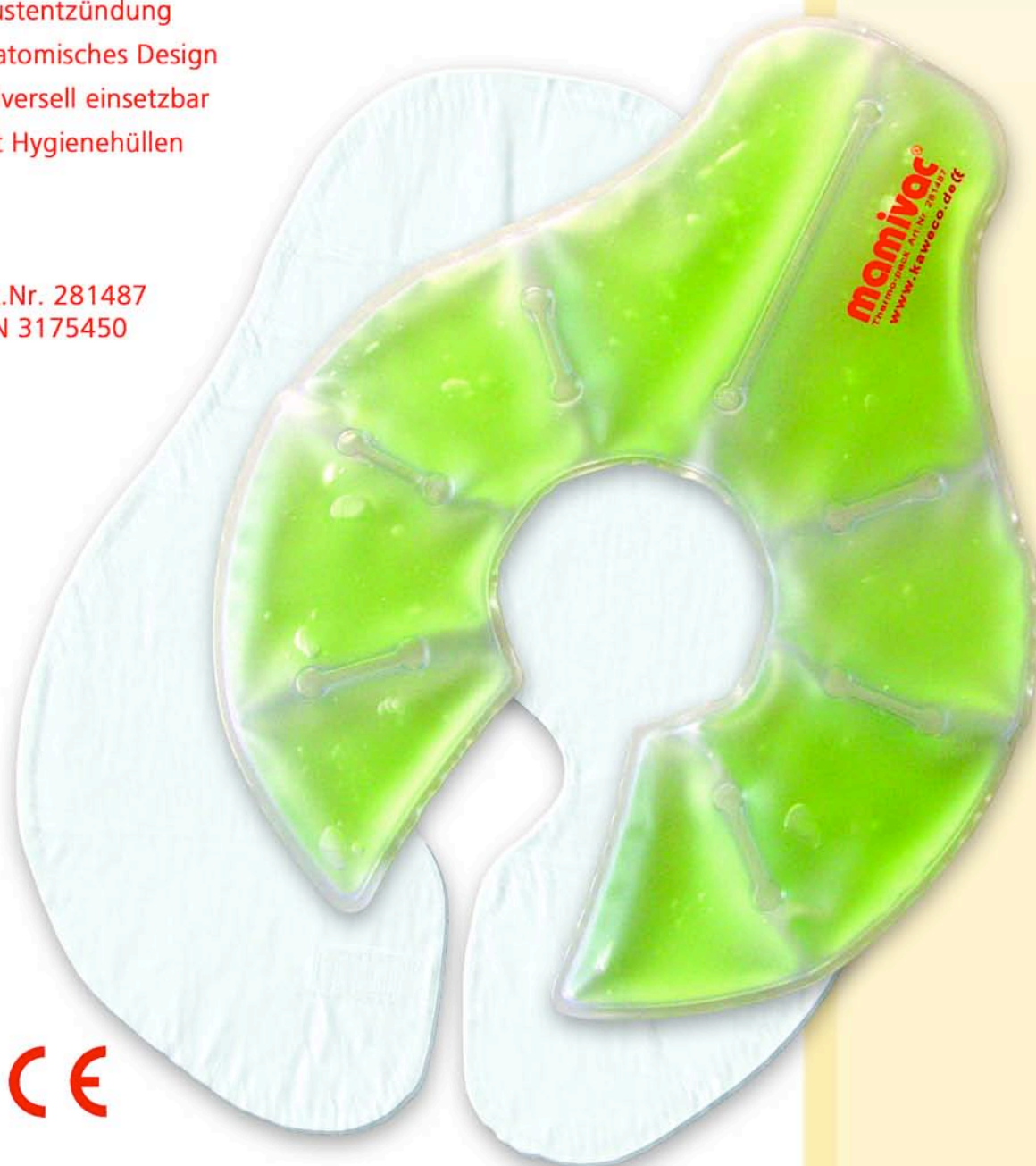


*... denn Babys mögen Muttermilch*

MEDIZINTECHNIK PUMPEN  
**Ka We Co**

[www.kaweco.de](http://www.kaweco.de)


# mamivac® Thermo-pack

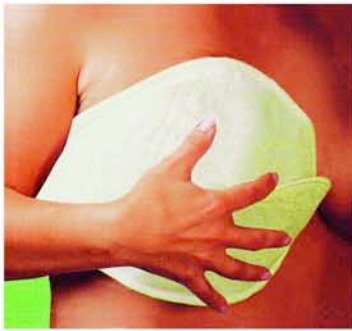

Die anatomische Form erlaubt eine Behandlung der axillär verlaufenden Brustdrüsen. Das Thermo-pack kann selbstverständlich auch als Universalkompressse z.B. an Nacken oder Knie eingesetzt werden.

Vor dem Stillen als Wärmekompressse eingesetzt, unterstützt das mamivac Thermo-pack das Auslösen des Milchflussreflexes und verhilft so zu einem angenehmen und erfolgreichen Stillen.

Nach dem Stillen als Kältekompressse angewandt, verschafft es wohltuende Linderung bei Brustentzündung oder Milchstau.

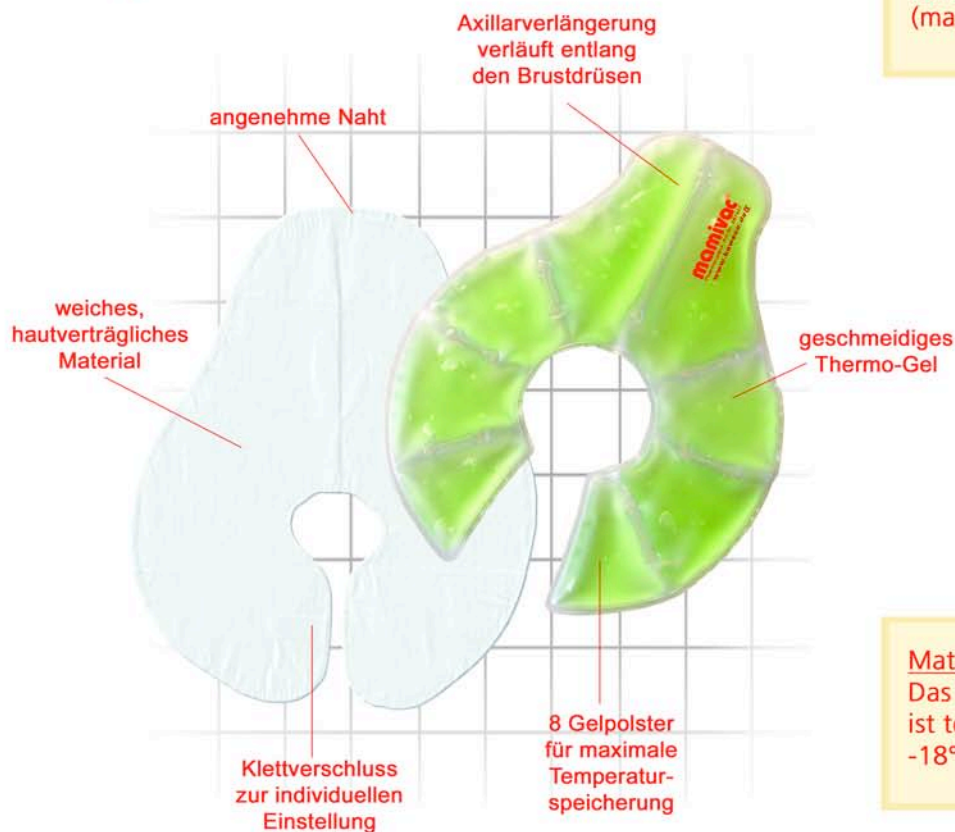

## Wärmen:

Im heißen Wasserbad (max. 80°C) ca. 5-10 Minuten oder in der Auftaustufe der Mikrowelle in der (600 Watt) erhitzen

## Kühlen:

Im Tiefkühlfach oder im Kühlschrank ca. 1 Stunde kühlen (max. bis -18°C)

## Material:

Das hochwertige Thermo-Gel ist temperaturbeständig von -18°C bis 100°C und ungiftig

Um die Haut vor zu großer Wärme- oder Kälteeinwirkung zu schützen, muss das **mamivac** Thermo-pack mit der speziell dafür entwickelten Schutzhülle angewandt werden. Die **mamivac** Schutzhüllen verfügen über einen eingearbeiteten Klettverschluss und ermöglichen somit eine individuelle Anpassung an unterschiedliche Brustgrößen.

Art.Nr. 281487 / PZN 3175450 **mamivac** Thermo-pack inkl. 3 Schutzhüllen  
Art.Nr. 281486 / PZN 3175473 **mamivac** Schutzhüllen, 5 Stück im Polybeutel



CE